

Twin Onrusthekken

De Twin onrusthekken brengen vele voordelen met zich mee op vlak van valpreventie, mobilisatie en het behoud van de autonomie van de bewoners.

Opbouw en bediening




- De Twin onrusthekken kunnen onafhankelijk van elkaar neergelaten worden.
- Elk onrusthekkendeel telt 3 latten: een bovenlat in massief hout, een tussenlat in aluminium en een paneel in gemelamineerde spaanplaat.
- De latten worden telescopisch in hoogte versteld en tellen 4 secties.
- Het telescopisch systeem schuift in het onderste paneel van het onrusthekken, zonder zijwaartse speling en zonder belemmering in de kamer.
- Het onrusthekken is voorzien van een centrale tweehandsbediening.
- Om de manipulatie van het onrusthekken te activeren, moet de bovenste lat eerst worden opgetild. Deze vergrendeling voorkomt het onbedoeld

neerhalen van het onrusthekken.

- Het onrusthekken biedt geen enkel risico op klemgevaar voor de handen. Bij het neerlaten van de bovenste lat, stopt deze automatisch op 25 mm van de tussenlat.
- De kleine tussenafstanden tussen de latten zorgen voor een hoge patiëntbescherming waardoor het onrusthekken probleemloos aan de strengste normen voldoet.
- In de laagste positie vormen de latten geen obstakel bij het uitstappen van de patiënt, het opmaken van het bed of bij een transfer van de patiënt.
- De totale hoogte bedraagt ca. 41 cm (vanaf het ligvlak).

Posities

- **Esthetische positie:** hoogte van 7,5 cm (vanaf het ligvlak). In deze laagste positie zijn de secties van het onrusthekken niet zichtbaar. Het uitstappen uit het bed is comfortabel en obstakelvrij (geen compressie ter hoogte van de benen).
- **Mobiliteitsbevorderende positie:** hoogte van 30 cm (vanaf het ligvlak). In deze middelhoge positie kunnen de onrusthekken dienen als opstahulp. De bovenste lat biedt de nodige ondersteuning aan de bewoner.
- **Hoogste positie:** hoogte van 41 cm (vanaf het ligvlak). Deze hoge positie beschermt en beveiligd de bewoner optimaal in zijn bed. Deze hoogte maakt het gebruik van anti-decubitus matrassen met een dikte tot 19 cm mogelijk.

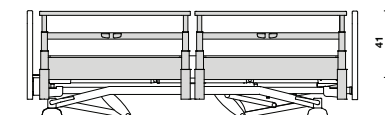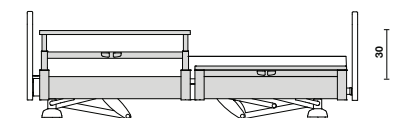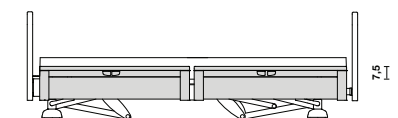

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma. Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.




Afmetingen

Twin onrusthekken

- laagste positie: 7,5 cm
- middenpositie: 30 cm
- hoogste positie: 41 cm

- maximale hoogte van de matras: 18 cm

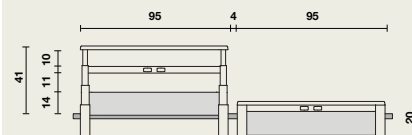

Materiaalgebruik en afwerking

- **Metaal:** aluminium.
- **Hout:** massieve beuk en gemelamineerde spaanplaat.
- **Kunststof.**
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

De Twin onrusthekken voldoen aan de **norm EN 60601-2-52**.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties en toebehoren

- Bovenlat in alu.
- Gestoffeerd paneel.
- Alu frame met HPL insteekpaneel.

